

Инструкция по сборке Кресло - стул с санитарным оснащением КТ810М Юки



1. Распакуйте детали, удалите транспортировочную упаковку и проверьте наличие всех элементов.



2. Соедините боковые ножки при помощи поперечных перекладин (перекладины должны быть установлены, как показано на фото).



3. Установите спинку.



4. Установите держатели санитарной ёмкости, как показано на фото (если держатели длинее, смотрите следующий шаг).



5. Если необходимо, подогните держатели санитарной ёмкости, если они выпадают из креплений.



6. Установите санитарную ёмкость.



7. Установите сидение и крышку.



8. Отрегулируйте ножки по высоте.